


# ТЕХНИКА ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА




## Области для инъекций и варианты их чередования

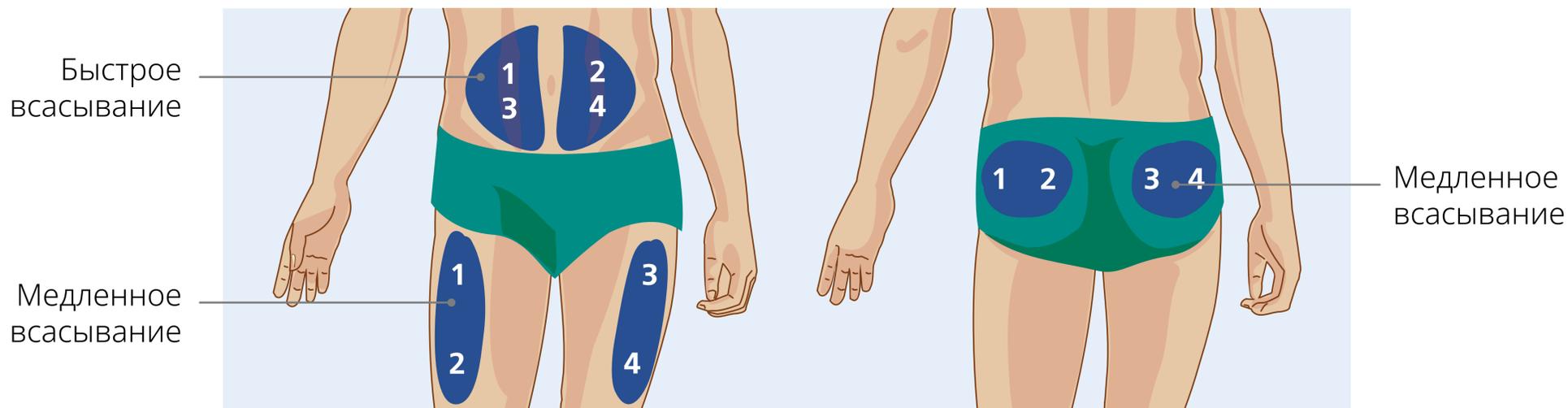

Преимуществом аналогов инсулина является способность всасываться с одинаковой скоростью из любой области для инъекций.


**!** Перед введением инсулина необходимо вымыть руки теплой водой с мылом

## Формирование кожной складки

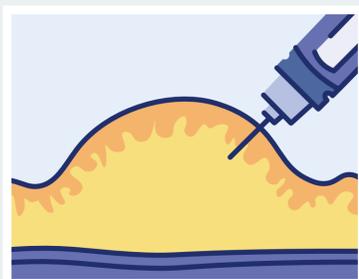

### Дети

Собрать кожную складку. Ввести иглу под углом в  $45^\circ$  в основание складки.

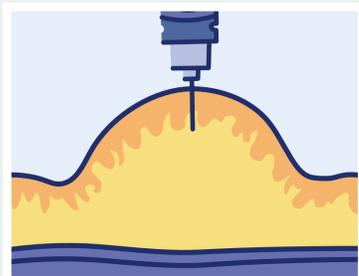

### Взрослые

Собрать кожную складку. Ввести иглу под углом в  $90^\circ$  к поверхности кожи.





Правильно



Неправильно

## Введение инсулина иглами различной длины

(слева направо: 4–5 мм, 6–8 мм)

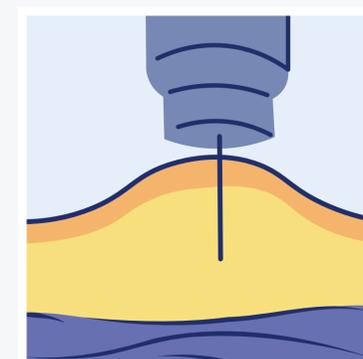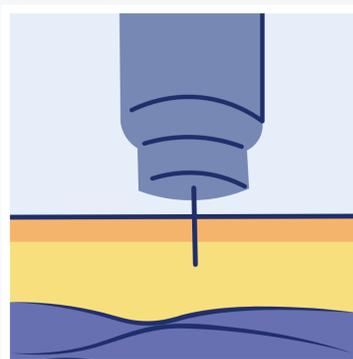

**!** После инъекции не вынимайте иглу из кожной складки не менее 6 секунд

Помните, что иглы предназначены только для однократного использования. Необходимо использовать новую иглу при каждой инъекции инсулина.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по использованию или проконсультируйтесь у специалиста. Товар сертифицирован. Регистрационные удостоверения № ФСЗ 2010/06867 от 05.09.2012 г., № ФСЗ 2008/01523 от 05.09.2012 г. Адаптировано из: Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 10-й выпуск (дополненный). М., 2021. DOI: 10.14341/DM.12802.

Материал подготовлен в целях повышения информированности пациентов о заболевании и не заменяет консультацию врача

RU22DI00049

**Движущая сила** | в лечении диабета



**ООО «Ново Нордиск»**

Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41  
Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13  
www.novonordisk.ru • www.novonordisk.com